


A-cerumen®

Raztopina za odstranjevanje zamaškov iz ušesnega masla in za preprečevanje njihovega nastanka

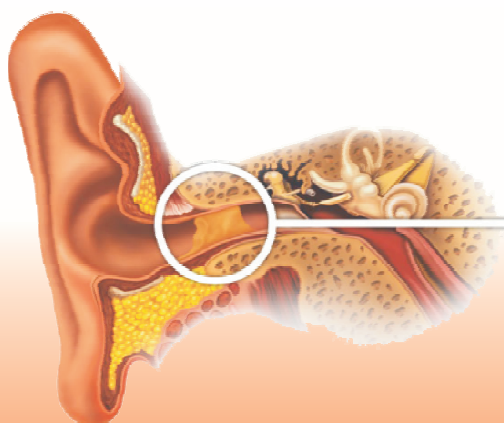

Preizkus na preiskovancih je dokazal **popolno odstranitev ušesnega masla pri 76 % preiskovancev po 4 dnevih uporabe** raztopine A-cerumen.

	1. dan prisotnost cerumna	5. dan prisotnost cerumna
A-cerumen	100 %	24 %
Parafinsko olje	100 %	76 %

Vse težave, povezane z zamaški iz ušesnega masla, so se zmanjšale v 90 % po 5 dnevih uporabe raztopine A-cerumen.

Rapiejko P. et al: Evaluation of the efficacy of A-cerumen earwax removal product. Ann. Med. Univers. Lublin (POL), 2006; VOL LX, SUPPL. XVI, N6

DR. GORKIČ

Gilbert
LABORATOIRES

A-cerumen®

10 plastenk po 2 ml

INDIKACIJE

Odstranjevanje zamaškov iz ušesnega masla in preprečevanje njihovega nastanka.
Redna higiena ušes.



SESTAVA in DELOVANJE

A-cerumen je vodna emulzija s tremi površinsko aktivnimi snovmi: TEA-Cocoyl Hydrolysed Collagen, Coco-Betaine, PEG 120 methyl glucose dioleate. Le-te obdajo zamašek iz ušesnega masla, zamašek razpoka zaradi hidrolize plasti poroženelih celic, vezne sile popustijo in zamašek razpade.

UPORABA

ODSTRANJEVANJE ZAMAŠKOV UŠESNEGA MASLA
Uporabite zjutraj in zvečer 3 - 4 dni zapored.

REDNA HIGIENA

Uporabite 2-krat na teden.

NAVODILO ZA UPORABO

1. V uho kanite polovico vsebine plastenke.
2. Pustite delovati približno 1 minuto.
3. Sperite uho s fiziološko raztopino.
(npr. fiziološka raztopina Physiodose®) →
4. Postopek ponovite pri drugem ušesu.



PREVIDNOSTNI UKREPI

Uporaba je priporočljiva za odrasle in otroke nad 30 meseci. Po navodilu zdravnika tudi za novorojenčke in dojenčke. Ne uporabljajte pri ljudeh s predrtim bobničem, pri ušesnih okužbah ali pri vstavljenih ušesnih cevkah.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

Medicinski pripomoček.

Naprodaj v lekarnah brez recepta.

www.a-cerumen.si

PROIZVAJALEC: Lab. GILBERT, Herouville Saint Claire, Francija
UVOZNIK: DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška 11, Logatec



GIL - 605796 - 01 - ver 01.10/2007